



TUOTETIEDOTE

Desinfiointi - Pintojen pikadesinfiointi

Wetrok SintoGard

Käyttövalmis, alkoholipohjainen pikadesinfiointiaine bakteereja, hiivasieniä ja vaipallisia viruksia vastaan - jälkiä jättämätön ilman huuhtelua





Wetrok SintoGard

KÄYTTÖ

- käyttövalmis, alkoholipohjainen desinfiointisuihke
- pienialaisten pintojen ja esineiden (esim. leikkauspöydät, tutkimustuolit) sekä muiden alkoholinkestävien materiaalien pikadesinfointiin
- käyttö julkisessa terveydenhuollossa, elintarvike- ja rehuteollisuudessa

OMINAISUUDET

- bakteereja tappava (sis. salmonellat, listeria- ja kampylobakteerit)
- hiivoja tappava (C. albicans)
- mykobakteereja tappava
- vaipallisia viruksia vastaan (influenssa)
- hajustamaton ja väriaineeton

HYVÄ TIETÄÄ

- Ei vaadi huuhtelua
- tuotteella saa käsitellä vain pienialaisia pintoja (räjähdysvaara)
- käsiteltävät pinnat on pidettävä kosteina koko vaikutusajan

HUOMIOITAVAA

- voi syövyttää kiiltäviä dispersioita säännöllisesti käytettynä
- maalatuille pinnoille ja vuorausmateriaaleille suositellaan aineen testaamista huomaamattomissa kohdissa

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Pintojen pikadesinfointi

Suihkuta desinfiointiainetta hyvin puhdistetulle ja kuivalle pinnalle tai sopivalle liinalle (esim. Bonlin). Kostuta liina hyvin tai käytä märkää liinaa. Pyyhi pieni pinta tai laite kosteaksi koko alaltaan. Älä kuivaa tai huuhtele. Noudata vaikutusaikaa. Käytä käsineitä.

ANNOSTUS JA VAIKUTUSAIKA

Teho	Testimenetelmä	Annostus (%)	Vaikutusaika
bakteereja tappava	EU 528/2012 mukaan	100	30 s
hiivoja tappava	EU 528/2012 mukaan	100	30 s
mykobakteereja tappava	EU 528/2012 mukaan	100	60 s
rajoitetusti viruksia tappava	EU 528/2012 mukaan	100	30 s

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Katso säilyvyys tuotteen etiketistä ennen avaamista.

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.



pH-arvo (Tiiviste): 6–7

Tärkeät ainesosat:

Etanoli 72 g / 100 g

METHODS
finder

