




Produktdatenblatt SintoGard

V 01 / 16.04.2014



Wetrok SintoGard

Desinfektionsmittel

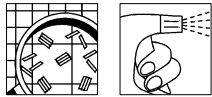

Dosierempfehlung:



Einwirkzeit: siehe Tabelle,
unverdünnt

Ihre Vorteile:

Gebrauchsfertige Sprühdeseinfektion auf Alkoholbasis.
Verdunstet ohne Rückstände.
Nachspülen ist nicht erforderlich.

Einsatz:

Zur Schnelldeseinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen (z.B. OP-Tische, Untersuchungsstühle) und sonstigen alkoholbeständigen Materialien. Einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen, Lebensmittel- und Futtermittelbereich.

Gut zu Wissen:

Behandelte Flächen müssen während der ganzen Einwirkungszeit feucht bleiben. Nur kleine Flächen behandeln (Explosionsgefahr). Bei regelmässiger Anwendung, können Selbstglanzdispersionen angegriffen werden. Bei Lackanstrichen oder Auskleidungsmaterialien sind Vorversuche an verdeckten Stellen empfohlen.

Organismus	Dosierung	Zeit
Bakterizid	unverdünnt	30 Sek
Fungizid	unverdünnt	30 Sek
Mykobakterizid	unverdünnt	60 Sek
Viruzid (Grippevirus/Influenza)	unverdünnt	30 Sek

Eigenschaften:

nicht schäumend

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Ethanol 723g/100g

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Oberflächendeseinfektion

Bei gut gereinigten und trockenen Oberflächen (kleine Flächen und Geräte) SintoGard auf Quick & Clean Dry aufsprühen (Tuch muss gut benetzt sein) und Flächen / Geräte vollflächig nass abwischen. Nicht nachtrocknen oder abspülen. Mundschutz und Handschuhe tragen.