




# Karta produktu SintoGard

V 01 / 16.04.2014

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok SintoGard

Środek dezynfekcyjny

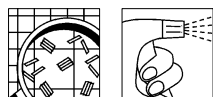

## Dozowanie:



Czas kontaktu: patrz tabela,  
nierozcieńczony

## Korzyści:

Gotowy roztwór do spryskiwania na bazie alkoholu  
Odparuje bez pozostałości  
Nie wymaga spłukiwania

## Zastosowanie:

Do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i przedmiotów (np. stoły operacyjne, fotele do badań) i innych materiałów odpornych na działanie alkoholu. Do stosowania w placówkach publicznej służby zdrowia, zakładach przetwórstwa żywności i pasz.

## Warto wiedzieć:

Przez cały czas kontaktu dezynfekowane powierzchnie muszą być wilgotne. Dezynfekować tylko małe powierzchnie (niebezpieczeństwo wybuchu). Regularne stosowanie może naruszyć powłoki z zawiesin samonabłyszczających. W przypadku powłok lakierowych oraz materiałów tapicerskich zaleca się przetestowanie działania produktu w niewidocznym miejscu.

Mikroorganizmy	Dozowanie	Czas
Działanie bakteriobójcze	nierozcieńczony	30 s
Działanie grzybobójcze	nierozcieńczony	30 s
Działanie mykobakteriobójcze	nierozcieńczony	60 s
Działanie wirusobójcze (wirus grypy)	nierozcieńczony	30 s

## Właściwości:

nie pieni się

## pH koncentratu:



## Główne składniki:

Etanol 723g/100g

## Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.  
Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

## Zalecane metody użycia:

### Dezynfekcja powierzchni

Dobrze wyczyścić i osuszyć powierzchnie (małe powierzchnie i urządzenia), spryskać ścierkę Quick & Clean Dry środkiem SintoGard (ścierka musi być dobrze zwilżona) i zmyć całe powierzchnie / urządzenia na mokro. Nie wycierać do sucha ani nie spłukiwać. Nosić maskę i rękawiczki.